

METODO D'USO

SBIANCAMENTO DENTI - WHITEWAY



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4



Vi suggeriamo di **effettuare una visita di controllo** dal vostro dentista di **fiducia prima di utilizzare questo prodotto**.



Attenzione ! Lo **sbiancamento e' sconsigliato** :

- Donne incinte.
- Donne infase di allattamento.
- Portatori di **apparecchi ortodontici**.
- Soggetti con denti danneggiati.

ESERCIZIO PRELIMINARE

Mettete una dentiera sull'arcata dentale superiore.

Aspirate completamente l'aria all'interno della dentiera inspirando con forza. **Questa operazione andrà effettuata** per far fuoriuscire l'acqua bollente, **e va eseguita anche per la dentiera** per l'arcata inferiore.

ACQUES BOLLENTE

Fate **bollire dell'acqua**, allontanatela dal fuoco. Immergetevi la **dentiera tenendola per la linguetta**, tenendola immersa per circa 4 secondi.

ADATTAMENTO DELLA DENTIRA

Tirate la dentiera fuori dall'acqua e applicatela **immediatamente sui denti, inspirando** con forza come già fatto per esercizio. Adattate con più cura la dentiera all'impronta dentale anche con le dita, se necessario.

In caso di errore è **possibile ripetere, per poche volte**, l'operazione tagliare la linguetta d'impugnatura.



Evitate di fumare **per mezza giornata dopo l'applicazione**, si consiglia ai fumatori di utilizzare quindi il prodotto alla sera.
Evitate che il prodotto che **potrebbe fuoriuscire dalla dentiera** vada sulle gengive, ed in tal caso rimuoverlo **con del cotone**.

Ripetete l'operazione per circa una settimana o **fino al raggiungimento del risultato** desiderato.
Le dentiere **devono essere pulite** con acqua fredda prima e **dopo ogni utilizzo**.

LAMPA PLASMA

Se utilizzate la lampada vi servirà a ridurre il tempo **d'applicazione di 30min a 10min**.

Prima del primo utilizzo **dovete ritirate la pellicola di protezione** situata sotto la pila effettuato la vostra **applicazione così indicata**.

Ci sopra, venze mettere la **lampada tra i vostri denti e le vostre labbra**.